



### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλώ ελέγξτε τη βαλβίδα ρύθμισης για τυχόν σημάδια ζημιάς ή μόλυνσης. Επίσης, ελέγξτε την ποσότητα του αερίου απο την ένδειξη του μανόμετρου **3** της φιάλης. Η πίεση του αερίου (ποσότητα αερίου) δίνεται απο την ένδειξη του μανόμετρου **3** μόνο όταν η βαλβίδα ON/OFF **4** της φιάλης είναι στη θέση ON.

#### Έλεγχος των λειτουργιών της βαλβίδας ρύθμισης:

- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου ροής **1** είναι στη θέση 0.
- Ανοίξτε τη Βαλβίδα Διακοπής **4a** περιστρέφοντας την αργά μέχρι το ON να εμφανίζεται πλήρως όπως στο παράθυρο **4a**.
- Ελέγξτε για διαρροές ακούγοντας τη συσκευή.
- Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ροής **1** προς τα δεξιά στη θέση **1** και ελέγξτε ότι το αέριο ρέει διαμέσου της εξόδου **2**. Συνεχίστε να περιστρέφετε το Κουμπί ελέγχου ροής **1** για να ελέγξετε τη ροή του αερίου σε καθεμία απο τις ρυθμίσεις.
- Κλείστε τη βαλβίδα ελέγχου ροής **1**, επαναφέροντας την στη θέση 0.

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου ροής **1** έχει οριστεί σε 0.
- Συνδέστε τα εξαρτήματα (κάνουλα ή μάσκα) στην έξοδο ροής **2a**.
- Ανοίξτε την Βαλβίδα Διακοπής **4** περιστρέφοντας αργά μέχρι να είναι πλήρης όπως εμφανίζεται μέχρι τη θέση που φαίνεται στο παράθυρο **4a**.
- Ρυθμίστε το Κουμπί ελέγχου ροής στην προβλεπόμενη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου ροής είναι ευθυγραμμισμένο σωστά όπως **1b**.

**⚠** Πριν από τη σύνδεση κάθε εξάρτημα με την ροή εξόδου βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή.

**Ανοίξτε τη Βαλβίδα Διακοπής ΑΡΓΑ!**

**Εξασφαλίστε πάντοτε ότι το κουμπί ελέγχου ροής έχει ρυθμιστεί σωστά και δεν τοποθετείται μεταξύ των ρυθμίσεων.**

**Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο κουμπί ελέγχου ροής! Η ανδεδειγμένη ροή είναι βάση των οδηγιών του ιατρού.**

### ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- Κλείστε τη βαλβίδα ON/OFF περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί μια σταθερή αντίσταση στην περιστροφή.
- Εάν υπάρχουν οποιοσδήποτε ιατρικές συσκευές που συνδέονται με την έξοδο, θα πρέπει να γίνεται εκτόνωση της πίεσης.
- Αποσυνδέστε τις οποιοσδήποτε ιατρικές συσκευές από την έξοδο ροής.
- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ροής στο 0.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κρατήστε το προϊόν και τα συγγενή υλικά του ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ:

- Πηγές θερμότητας (φωτιά, τσιγάρα, e-τσιγάρα ...)
- Εύφλεκτα υλικά.
- Όλα τα λάδια και γράσα: ποτέ δεν χρησιμοποιούμε κρέμες χεριών ή κρέμες κατά τη χρήση ή το χειρισμό του εξοπλισμού.
- Νερό.
- Σκόνη.

Εμποδίστε την πτώση ή κάθε είδους κρούση της φιάλης και του εφοπλισμού της.

Να διατηρείτε πάντα τα πρότυπα καθαριότητας οξυγόνου.

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν και το σχετικό εξοπλισμό του μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
	-20* / +65 °C
	10 / 100 %
	600 / 1200 mbar

Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ρύθμισης με θερμοκρασίες κάτω από -20 ° C.

Πριν συνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή ιατρική συσκευή στην βαλβίδα ρύθμισης, πάντα να ελέγχετε ότι είναι πλήρως συμβατά με τα χαρακτηριστικά σύνδεσης και των επιδόσεων του προϊόντος.

Εάν η βαλβίδα ρύθμισης έχει υποστεί ζημιά ή έχουν μολυνθεί τότε μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας.

Συνιστάται εμφιάλωση σε πιστοποιημένα - εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, εμφιαλωτήρια όπου κατέχουν τον ειδικό προσαρμογέα κωδ. 0810542.

Εγγύηση 2 έτη.

Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς από μη εξουσιοδοτημένο εξοπλισμό, η συσκευή τίθεται αυτομάτως εκτός εγγύησης.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Tel: +30 2821063222

Email: [mobiakcaresales@mobiak.gr](mailto:mobiakcaresales@mobiak.gr)

[Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mobiakcare.gr](http://www.mobiakcare.gr)